

3 PM 100 A

CATEGORIE

Patients alités plus de 15h par jour



CLASSE LPP 1B

INDICATIONS

- Risque moyen à élevé
- Patient levé dans la journée, alité plus de 15 heures.



PRESCRIPTION

Surmatelas à air motorisé
Cairflow **PM 100 a** :
Code LPP : 1278045

Support de plus de 5 cm
surmatelas
Code LPP : 1205477

Location : La prise en charge
du surmatelas **PM 100 a**
est permise dans le cadre
des soins à domicile sous
le code prévu à la location.
Code LPP 1217374.

ENTRETIEN

Lavage en machine
jusqu'à 90°C

Séchage en machine
jusqu'à 60°C

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Utilisez une lotion
décontaminante non chlorée
ou le Surface Haute ou
Surfa'Safe des laboratoires
ANIOS.



AIR MOTORISÉ

DESCRIPTIF

- Surmatelas à air dynamique de 13 cm d'épaisseur, 2 couches de cellules alvéolées polyuréthane avec alternance des pressions toutes les 8 minutes.
- Support mousse Haute Résilience pour un maintien ferme et une meilleure répartition des pressions.
- Compresseur avec ajustement manuel du poids patient de 40 à 120 kg, alarme visuelle en cas de chute de pression.
- Housse Ag-Protect, traitement argent pour lutter contre le staphylocoque doré (MRSA) et les bactéries multi-résistantes (BMR).
- Disponible en largeur 120 cm avec base en mousse 30 kg/m³ avec portance ferme, forme en U avec bordures stabilisatrices pour apporter une aide lors des transferts.

AVANTAGES

- Idéal pour maintien au domicile, air à pression alternée avec cycle de 8 minutes.
- Disponible en largeur 120 cm.
- Très simple à installer et à utiliser.



Réglage manuel de 40 à 120 kg

GARANTIE 1 AN

DIMENSIONS	COMPOSITION	POIDS DU PATIENT	POIDS	CLASSEMENT AU FEU	HOUSSE
200 x 90 x 18 cm	Cellules polyuréthane pneumatiques	40 à 120 Kg	13 Kg	EN NF 597 - Parties 1 et 2	Housse cartex Argent
200 x 120 x 18 cm					